

Guantes de Examinación de Nitrilo



Características

- Formulado con Acronitrilo butadieno, solución alternativa para alergias individuales tipo I
- Cumplimiento grado médico AQL 1.5
- Protección contra sustancias no deseadas o peligrosas
- Bio-compatibilidad testada
- Mayor comodidad con excelente agarre

Estándar de Calidad

- ISO 13485, Sistema de Gestión de Calidad de dispositivos médicos
- ASTM D6319
- Conformidad con la Directiva Europea de dispositivos médicos 93/42 / ECC (CE clase 1)
- Conformidad con el equipo de protección personal, reglamento PPE (UE) 2016/425

Especificación de Producto

- Estéril → No estéril
- Color → Color Negro



Dimensiones y Propiedades

Dimensión física	ASTM	EN 455-2
Longitud (mm)		
	S Min. 220	Min. 240
	M,L,XL Min. 230	
Espesor		
Dedos	Min. 0.005	NA
Palma	Min. 0.05	NA
Ancho de Palma (mm)		
S	80 + 10	80 + 10
M	95 + 10	95 + 10
L	110 + 10	110 + 10
XL	120 + 10	>110
Propiedades físicas	ASTM D6319	EN 455-2
Resistencia a la Tracción		
Antes del envejecimiento	Min. 14 MPA	NA
Después del envejecimiento	Min. 14 MPA	NA
Elongación de ruptura (%)		
Antes del envejecimiento	Min. 500	NA
Después del envejecimiento	Min. 400	NA
Fuerza de ruptura (N)		
Antes del envejecimiento	NA	Min. 6
Después del envejecimiento	NA	Min. 6

Guantes de Examinación de Nitrilo



Modo de Uso

Verificar la integridad del producto antes de su uso.

No reutilizar

Usar con manos secas y limpias

Coloque los guantes en ambas manos antes de iniciar el proceso productivo, tarea clínica, industrial o aseo, evite la contaminación de este, realice cambio de esta las veces que sea necesario durante su jornada.

Después de uso disponer adecuadamente, lavar e hidratar sus manos

Cantidad

Los guantes vienen en tamaños S, M, L en caja dispensadora de 100 unidades y 10 cajas dispensadoras por cartón.

Almacenamiento

Mantener en lugar fresco y seco, temperatura ideal 10° a 30° Celsius.

No Exponer a luz UV directa por periodos prolongados.

Conservar el envase cerrado en un lugar protegido para evitar contaminación del producto.

Durabilidad, en su embalaje original 5 años.



Clapps Chile SpA



Contacto@clappschile.cl



+56 2 29545541 // + 56 2 26891576

